


# Indicateur frontal de température

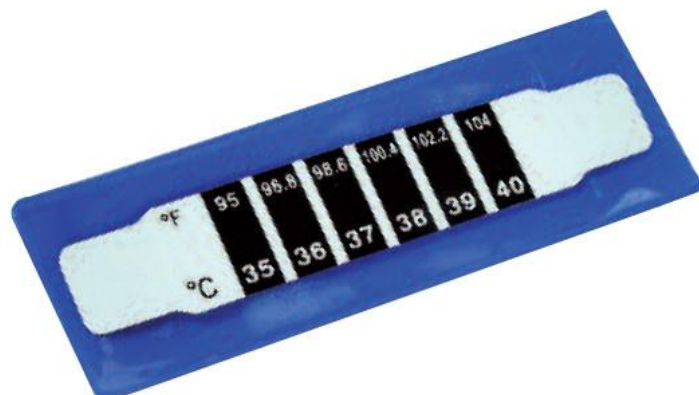

Indicateur de fièvre frontal à cristaux liquides

- Incassable
- Réutilisable (à nettoyer avec un chiffon doux et sec après utilisation)
- Non toxique
- A utiliser à température ambiante entre 19°C et 25°C

## **Mode d'emploi :**

Placer le thermomètre durant 15 secondes sur le front en tenant bien les 2 extrémités (le front doit être sec)/  
Lire de suite la température affichée ou si possible quand le thermomètre est encore placé sur le front.

## Affichage des couleurs :

Vert : la température affichée est correcte

Rouge : déduire 0,5 °C de la température affichée

Bleu : rajouter 0,5 °C à la température affichée

Sous pochette cristal

Référence : 400318



[www.urgence-secours.fr](http://www.urgence-secours.fr)

Le spécialiste  
des équipements d'urgence