

Axxess

Rampes d'accès télescopiques

Ce mode d'emploi est disponible dans une édition en gros caractères. Si vous souhaitez recevoir un tel exemplaire, veuillez contacter le Service Après-vente de Homecraft Rolyan.

Avant d'utiliser vos nouvelles Rampes d'Accès Télescopiques, il est essentiel que vous lisiez ce mode d'emploi et preniez connaissance des consignes d'utilisation qui y sont exposées.

Nouveau Code	Ancien Code	Charge Maximale
09 111 9726	AA8732	450 kg
09 111 9759	AA8736	400 kg
09 111 9775	AA8738	350 kg

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez que les rampes ne sont pas endommagées.
2. Etirez les rampes jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Pour ce faire, tenez-les à l'horizontale ou posez-les au sol. **Note : Si le verrou n'est pas engagé, lorsque la rampe n'est en position horizontale, la partie intérieure peut glisser du fait de son propre poids.** En position d'extension maximale, le verrou s'engage afin d'éviter que la rampe intérieure ne glisse complètement.
3. Positionnez les rampes avec l'intervalle souhaité. Les roues avant et arrière du véhicule doivent pouvoir rouler facilement sur les rampes.
4. Placez la rampe sur la surface de réception, en veillant à ce que le rebord supérieur repose fermement sur la surface de réception.
5. Veillez à ce que le rebord supérieur soit bien positionné avant d'utiliser vos Rampes d'Accès Télescopiques Axxess. Des trous pré-percés au sommet de chaque partie peuvent être utilisés pour fixer la rampe à la surface de réception.
6. Après utilisation, dégagez le verrou (si la rampe était en position d'extension maximale) et faites glisser les parties l'une dans l'autre jusqu'à ce que le verrou s'engage. Une fois verrouillées, les rampes peuvent être transportées en toute sécurité.

Pour éviter que les rampes ne se délogent durant leur utilisation, veillez à ce que les rebords supérieurs chevauchent la surface de réception autant que possible. Nous recommandons de fixer temporairement les rampes à la surface de réception au moyen d'axes d'assemblage, ou de manière semi-permanente en utilisant des vis passées dans les trous pré-percés au sommet de chaque partie. La surface sur laquelle les rebords supérieurs reposent doit être solide. Assurez-vous que cette surface et la structure qui la soutient sont suffisamment robustes.

Lorsque vous choisissez des rampes, la longueur, et donc l'angle d'inclinaison des rampes, dépendent de :

- La hauteur de la surface de réception
- Le type de fauteuil roulant ou de scooter pour handicapés

- Le poids de ce véhicule et de son utilisateur
- La force de l'utilisateur ou de son assistant

En règle générale, une pente d'1 sur 12 est recommandée lorsque l'utilisateur est assis sur un fauteuil roulant ou un scooter. Pour charger un fauteuil roulant ou un scooter vide dans un véhicule, une inclinaison supérieure peut être utilisée, mais elle ne devrait pas dépasser 1 sur 3. De plus, il est important que vous vous reportiez au mode d'emploi de votre véhicule concernant le bon degré d'inclinaison/de déclivité et les instructions à suivre pour l'utiliser sur des rampes. Ne dépassez jamais ces recommandations.

Nettoyage et entretien

Essayez la rampe au moyen d'un chiffon imprégné d'eau et d'une solution détergente douce. Ôtez toute poussière ou saleté qui aurait pu se glisser entre les différentes parties.

Garantie

Homecraft Rolyan garantit que les rampes sont exemptes de vices de matériau et de fabrication. Cette garantie demeurera en vigueur durant un an à compter de la date d'achat du produit par le consommateur. La garantie ne couvre pas les défaillances du produit survenant pendant la période de garantie qui ne seraient pas dues à un défaut de matériau ou de fabrication, ou qui seraient provoquées par une utilisation indue.

Homecraft Rolyan Ltd ne peut être tenu responsable de dommages accessoires ou consécutifs ou dommages matériels. S'il s'avérait nécessaire de renvoyer les rampes, il est essentiel que celles-ci soient convenablement emballées pour les protéger durant leur transport, de préférence dans leur carton d'origine. En cas contraire, Homecraft Rolyan Ltd n'assume aucune responsabilité pour les dommages subis par le produit en cours de transport.

Cette disposition ne porte pas atteinte à vos droits légaux.

Spécifications

Nouveau Code	Ancien Code	Pièces	Longueur min. (mm)	Longueur max. (mm)	Largeur intérieure	Largeur extérieure	Poids unitaire
09 111 9726	AA8732	2	880	1500	188	245	6,8
09 111 9759	AA8736	2	1130	2000	188	245	8,7
09 111 9775	AA8738	2	1630	3000	188	245	12,6

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Fabriqué pour

Homecraft Rolyan, A Patterson Medical Company,

Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, Royaume-Uni.

UK : Tél. : 01623 448 702 Fax : 01623 557 769 www.homecraft-rolyan.com

International : Tél. : +44 1623 448 706 Fax : +44 1623 448 784

Sammons Preston Rolyan, 4 Sammons Court, Bolingbrook, IL 60440-5071, Etats-Unis.

Tél. : 1-630-226-0000 Fax : 1-630-226-1390

70217 Is4 © Homecraft Rolyan 2008