

Boucle magnétique Porte Document (Réf.272102) **Notice d'utilisation**



Le porte document intègre une boucle magnétique compacte et portable, prêt à l'utilisation dès sa mise en marche. Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

Principe de fonctionnement

Le porte document utilise son microphone intégré pour enregistrer le son et le transmettre via la boucle d'induction intégrée. Les signaux ainsi émis peuvent être reçus par un dispositif auditif qui sera réglé sur la position "T" ou "MT".

Mise en marche de l'appareil

Lors de la première utilisation, il faut d'abord charger le porte document pendant 16h.

Afin de préserver la durée de la batterie, l'appareil se met automatiquement en veille au bout de 10mn mais l'utilisateur peut augmenter la durée à 20 ou 30 minutes ou peut empêcher la mise en veille.

Pour mettre en marche le porte document, il faut appuyer sur le bouton On/Off, une lampe LED rouge va s'allumer en continu.

Si vous laissez appuyer 2secondes de plus sur le bouton, la lampe LED va flasher 2 fois ce qui indique que la mise en veille va intervenir après 20 minutes. Si vous laissez appuyer encore 2secondes, la lampe led va clignoter 3 fois ce qui indique que la mise en veille va intervenir après 30 minutes. Si vous laissez appuyer encore 2secondes, la lampe led va clignoter 1 fois lentement ce qui indique que la mise en veille est désactivée.

Lorsque le son est détecté une lampe led verte clignote ce qui indique que la boucle magnétique est en cours de transmission.

Pendant ce temps, vous pouvez utiliser le porte document comme un porte document classique, ou vous pouvez aussi placer l'appareil sur un bureau, ou sur un guichet.

L'appareil peut être éteint manuellement à tout moment en appuyant sur le bouton on/off ce qui va éteindre la lampe LED rouge.

L'appareil s'utilise avec une portée de 1.2m environ.

Alimentation électrique du porte document

Le porte document peut fonctionner à l'aide de la batterie rechargeable intégrée ou de l'alimentation secteur. Lorsque la batterie est pleinement chargée, l'appareil possède jusqu'à 10 heures d'autonomie. Une batterie vide doit être rechargée pendant environ 16 heures afin d'être à nouveau complètement chargée.

Garantie

Cet amplificateur est très fiable. Si en dépit d'un montage et d'un emploi corrects, des dysfonctionnements apparaissent, veuillez nous contacter. L'appareil est garanti pendant 1 an.