

Société CYMEQ Healthcare France



L'élévateur manuel pour piscines

A large, semi-transparent version of the CYMEQ Healthcare logo is centered on the page, serving as a watermark. It consists of three stylized waves in shades of light blue and teal, with the text "CYMEQ" in a bold, dark blue serif font and "HEALTHCARE" in a smaller, dark blue sans-serif font below it.

CYMEQ
HEALTHCARE

Autonomie - Qualité de vie - Innovation

L'élévateur manuel pour piscines

L'élévateur manuel est utilisé afin d'équiper les piscines et SPA enterrés

Cet élévateur est **manuel** (pas besoin d'électricité) et tourne à 360° (il nécessite l'aide d'une tierce personne).

L'installation de cet élévateur nécessite la pose d'un socle à sceller dans le sol : Nous conseillons de placer le socle à 40cm du bord de la piscine.

→ Sur dalle existante en béton : faire un carottage dans la plage d'environ 8 cm de diamètre, sur environ 25 cm de profondeur et sceller le socle.

→ S'il n'y a pas de dalle en béton, prévoir un socle en béton d'environ 50 cm x 50 cm sur 80 cm de profondeur et sceller le socle du siège.

L'utilisation de l'élévateur manuel est **très simple**.

Une fois la personne installée dans la nacelle (réglable par système de chaînes), l'assistant fait pivoter manuellement le siège au dessus du bassin, puis actionne plusieurs fois la poignée pour faire descendre le siège dans l'eau. Et inversement afin de remonter l'utilisateur.



Caractéristiques :

- Elévateur manuel.
- Pièce à seller dans le sol mais aucune installation à l'intérieur du bassin.
- Poids maximum de l'utilisateur : 110Kg.
- Léger et facilement transportable (poids d'environ 40Kg)

N'hésitez pas à visiter notre site internet www.cymeq.com ou à nous contacter au **04.27.02.19.99** afin d'obtenir des informations supplémentaires sur nos produits



CYMEQ France

**8 rue Bourgelat
69002 LYON**

Tél : 04.27.02.19.99

Fax : 04.27.02.11.88

www.cymeq.com