



le complexe de matière a été testé conforme aux caractéristiques techniques des masques grand public jusqu'à 100 LAVAGES* réalisés en laboratoire IFTH, hors prise en compte des conditions d'utilisation réelles

COMPOSITION

DOUBLE COUCHE DE TISSU
NON-TISSÉ POLYPROPYLENE
(63G/M²)

FENÊTRE TRANSPARENTE

BARRETTE NASALE

BRIDES ÉLASTIQUES

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Ce masque est lavable 20 fois.

STOCKAGE :

Les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

CONDITIONNEMENT :

Individuel sous blister.

POIDS :

Notre masque est parmi les plus légers du marché : 5g

FICHE TECHNIQUE AERMASK-3PT MASQUE LAVABLE UNS CATÉGORIE 1

FACE À CETTE CRISE SANITAIRE DU COVID-19, AERTEC GROUP S'ASSOCIE AU CSF (COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE MODE ET LUXE) ET À L'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (IFTH) POUR FABRIQUER ET DISTRIBUER DES MASQUES AFIN DE LUTTER CONTRE LA PÉNURIE.

DOMAINE D'UTILISATION :

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

PERFORMANCES :

AERMASK-3PT	Norme : Note interministérielle du 29 mars 2020 et guide AFNOR SPEC S76-001 V1.1	Neuf	20 lavages	100 lavages (complexe textile)
Respirabilité	> 300 L.m-2.S-1 (à dépression 100 Pa)	325	331	383
Filtration	Efficacité > 90% (particules de 3µm)	94	100	99
N° rapport	NA	2020-06-03-112-0	2020-06-03-112-50	20-02003 V2
Source	NA	IFTH	IFTH	IFTH
Date	NA	03/06/2020	03/07/2020	29/10/2020

FABRIQUÉ ET CONÇU EN FRANCE

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19





AERMASK-3PT

MODE D'EMPLOI

Le complexe de matière a été testé conforme aux caractéristiques techniques des masques grand public jusqu'à 100 LAVAGES* réalisés en laboratoire IFTH, hors prise en compte des conditions d'utilisation réelles

COMMENT METTRE LE MASQUE :



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique



Placer le masque sur le visage



Fixer les brides à l'arrière de la tête



Ajuster la position du masque sur le visage


LORSQUE L'ON PORTE LE MASQUE :

- Eviter de toucher le masque
- Ne pas déplacer le masque
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé :
Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Si besoin de manger : changer de masque
- Si le masque s'humidifie : remplacer le masque par un nouveau.
Ne pas réutiliser

COMMENT RETIRER LE MASQUE :



Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique

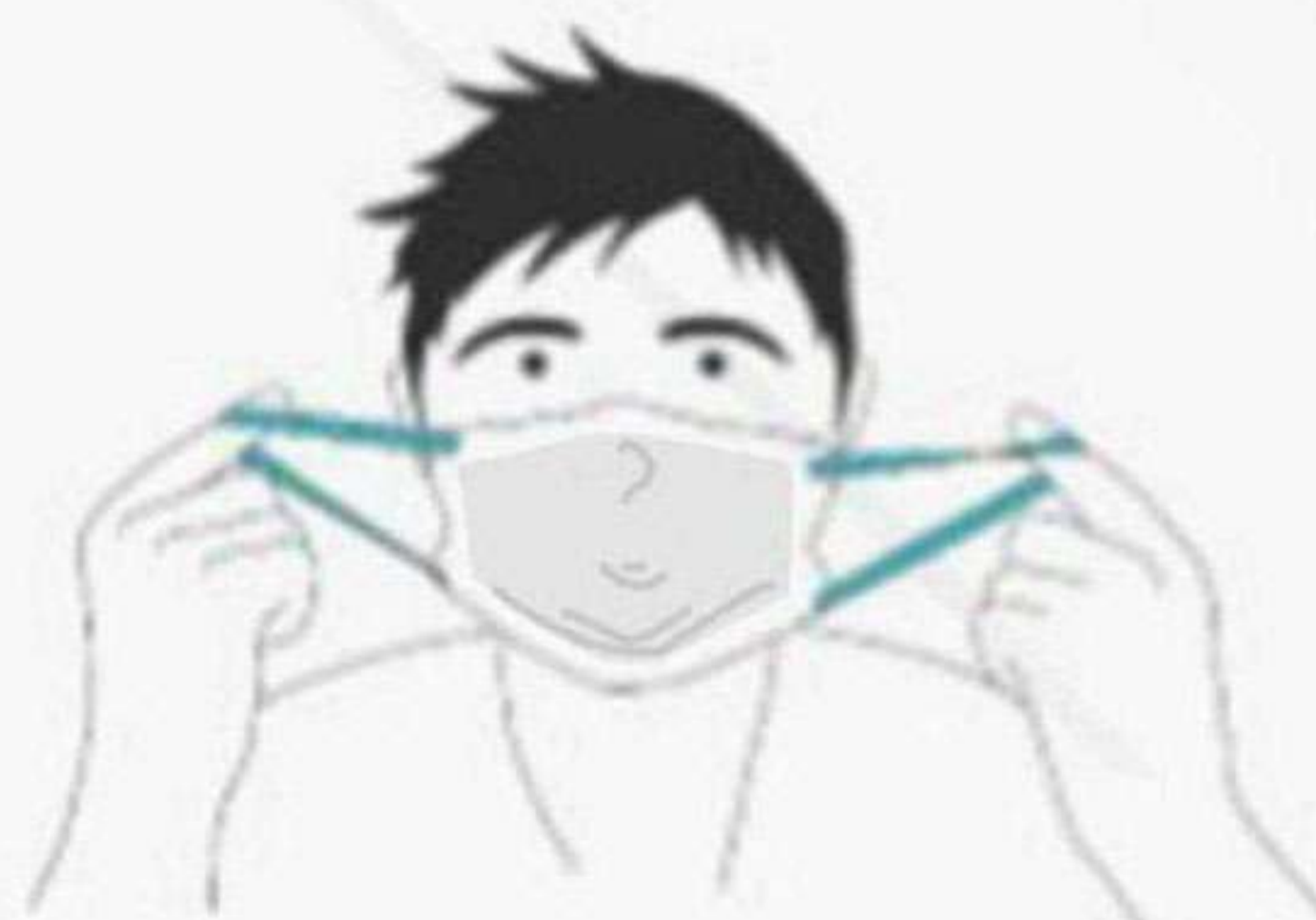

Retirer le masque en saisissant les brides et sans toucher la partie avant




Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique

COMMENT LAVER LE MASQUE :



Mettre le masque en machine dans un filet de lavage

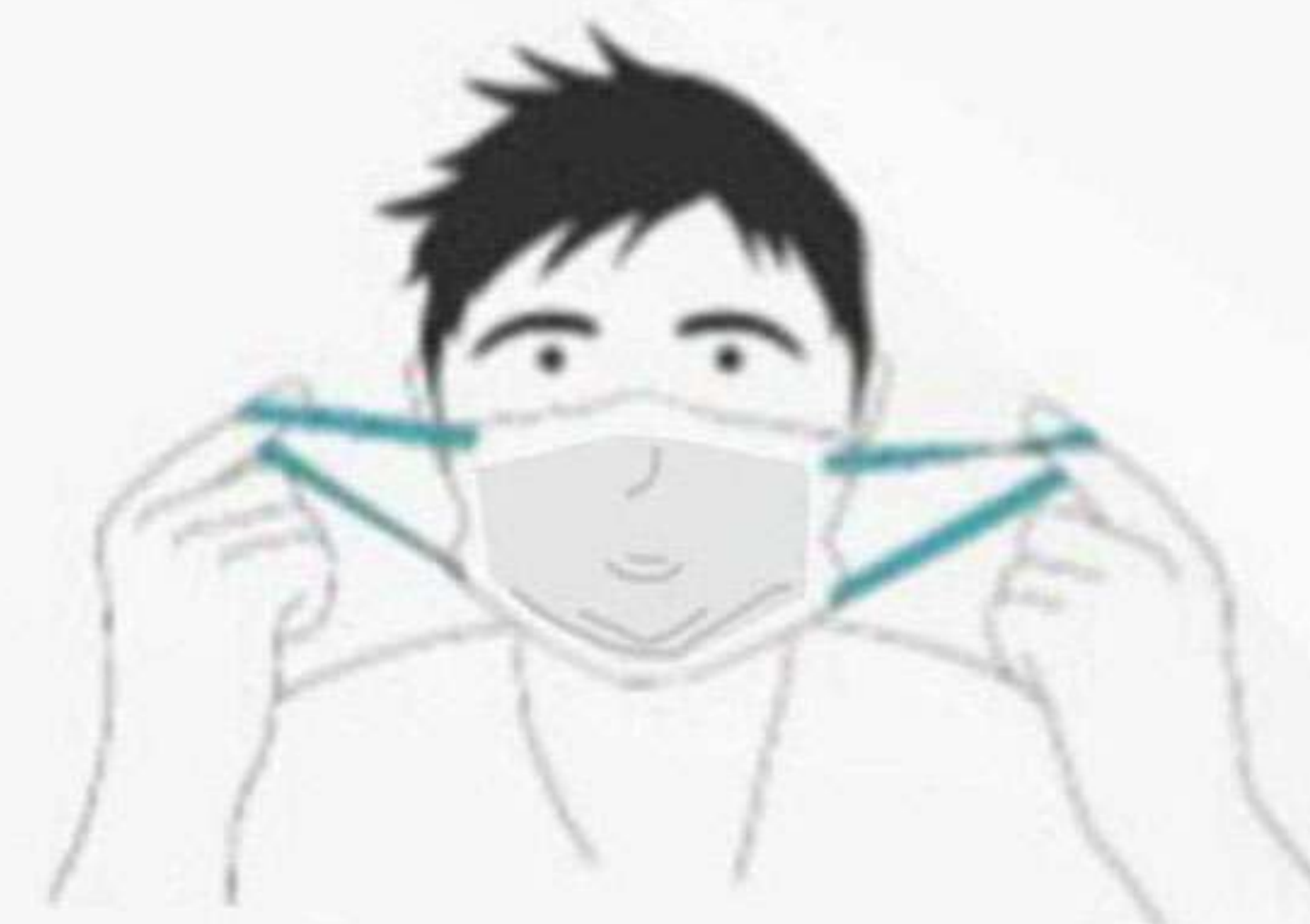

Laver avec un produit lessiviel. Le cycle doit comprendre un plateau minimum de 30min à 60°C. Cycle de lavage standard 1h. Essorage 600 tr/min



Sécher le masque au sèche-linge (programme très sec)