

NOTICE D'UTILISATION - N° 01701
Document téléchargeable sur le QR code ci-après :

**Masque «GRAND PUBLIC »
catégorie 1
Modèle : AMA06**

FILTRATION GARANTIE
TESTÉ 30 LAVAGES



COVID-19

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celles des autres, il est important de respecter cette notice d'utilisation

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez**.
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez**.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

Ce masque en tissu lavable et réutilisable est une alternative efficace aux masques à usage unique pour lutter contre l'épidémie du COVID-19. Il répond à la spécification AFNOR S79-001 du 27 mars 2020 sur les bases de la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020 par le directeur général de la santé, le directeur général des entreprises, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général du travail, et la directrice générale des douanes et des droits indirects.

C'est un équipement de travail **exclusivement réservé à des usages non sanitaires** destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.

La note d'information interministérielle définit deux catégories de masques, comme suit :

- Catégorie 1: Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.
- Catégorie 2: Masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

DOMAINE D'UTILISATION



Le masque modèle AMA06 répond aux critères de la catégorie 1. Il est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. **Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.** L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités** (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être proposé aux professionnels ou au grand public.

PERFORMANCES / SECURITE

Ce masque répond aux exigences de la catégorie 1. Il possède une efficacité de filtration supérieure à 90% pour les particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
La respirabilité du masque a été mesurée à $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ et permet son port pour une durée de 4 h.

Valeurs aux tests avant lavage (rapport DGA N° RP/20-2532/DGA MNRBC/2000305/NP version 1), après 10 lavages (rapport DGA N° RP/20-2783/DGA MNRBC/2000305/NP version 1) et après 30 lavages (rapport IFTH 2020-05-29-097-30 du 30/06/2020) :

Tests DGA/IFTH	Avant lavage	Après 10 lavages	Après 30 lavages
Efficacité de filtration des particules de 3 µm	99,60%	99,70%	100,00%
Perméabilité à l'air à 100 Pa	139 L.m ⁻² .s ⁻¹	116 L.m ⁻² .s ⁻¹	131 L.m ⁻² .s ⁻¹

Le test au porter pendant 4 heures a été réalisé par nos soins.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?



- Avant de toucher le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajuster le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.
- Lorsque l'on porte le masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
- Il faut changer le masque quand il devient difficile de respirer ou lorsqu'il s'humidifie.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- Pour retirer le masque : décrocher les lanières élastiques des oreilles (ne pas toucher le devant du masque) ; le mettre dans un sac en plastique prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

Durant une même période de 4 h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE MASQUE ?

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.



Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches). Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-linge, utiliser un sèche-cheveux ou encore faire sécher à l'air libre sur un support propre et désinfecté. Repassez le masque à la température de 120 °C.



Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 30 fois.

COMPOSITION DE LA MATIERE PRINCIPALE

- Ce masque est composé d'étoffes multicouches :
- 2 couches externes en tissu 50% coton / 50% polyester
 - 1 couche interne en non-tissé 100% polypropylène.

STOCKAGE DU MASQUE

Masque non utilisé à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière. Conservez le masque dans une humidité maximale de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.